

Nouvelles fonctions

Indications affichées sur l'écran

Le nébuliseur eFlow[®]rapid avec générateur eBase est très efficace. Son écran fournit des indications pendant l'inhalation.




Quelques exemples :




Niveau de charge de la pile à 50 %

-> Piles neuves à portée de main ou fonctionnement à l'aide du bloc d'alimentation secteur

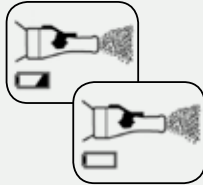


Interruption de la connexion du câble à l'unité de commande ou au nébuliseur

-> Contrôle des connexions de câble

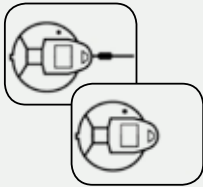

Aucun médicament ajouté

-> Ajout de médicament

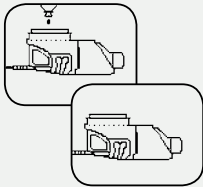

À savoir :

Le générateur eBase peut être utilisé avec le nébuliseur eFlow[®]rapid pour un usage général ou avec des nébuliseurs thérapeutiques (comme Altera[®] pour Cayston[®]).



Le nébuliseur complet eFlow[®]rapid et le tamis eFlow[®]rapid sont compatibles avec les deux modèles de générateurs eFlow[®]rapid : couleur bleu clair (sans écran) et couleur bleu foncé (avec écran, modèle eBase).



eFlow[®]rapid, tamis pour nébuliseur
Référence 678B2620



Notre filiale

PARI PulmoMed S.A.R.L.
Z.A. du Petit Nanterre
11 avenue de l'île Saint-Martin
92737 Nanterre Cedex

Téléphone: +33 (0) 1 56 83 85 00
Téléfax: +33 (0) 1 56 83 85 09
e-mail: clients@pari-pulmomed.fr
www.pari-pulmomed.fr

eFlow[®]rapid avec générateur eBase



© PARI Pharma GmbH 178D1057-B 06/2014



**Aérosolthérapie moderne :
deux fois plus rapide !**



eFlow[®]rapid permet une inhalation rapide et efficace, qui réduit significativement la contrainte de la thérapie^{1,2}.

Résumé des principaux avantages :

- ➔ Une thérapie courte **est synonyme de meilleure qualité de vie**
- ➔ Fonctionnement silencieux pour une **utilisation discrète**
- ➔ Légèreté, faible encombrement et maniabilité. Fonctionnement possible sur piles ou secteur pour **une plus grande mobilité**
- ➔ Simplicité de nettoyage. Le nébuliseur peut être désinfecté et traité à l'autoclave pour des **normes d'hygiène optimale**
- ➔ Nouvel écran. **Il fournit des indications** lors de l'inhalation

1) Fischer R et al. 2007, J Cyst Fibr 6 (Suppl. 1): 41.
2) Naehrig S et al. 2011, Eur J Med Res 16: 63-66.

**Conseils d'hygiène
à la maison**

Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions d'utilisation.


- ➔ **Nettoyage**
Démontez les différents composants du nébuliseur. Rincez soigneusement à l'eau chaude avec un peu de détergent après chaque inhalation.



- ➔ **Désinfection**
Désinfectez le nébuliseur démonté et le tamis pour nébuliseur au moins une fois par jour en les plaçant dans un stérilisateur à biberons disponible dans le commerce pendant 6 minutes ou en les mettant dans de l'eau distillée bouillante pendant au moins 5 minutes.



- ➔ **Séchage**
Séchez les différentes parties intégralement.

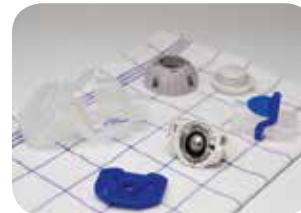

- ➔ **Stockage**
Stockez le nébuliseur dans un endroit propre, sec et hygiénique.

**Test de
fonctionnement
des tamis pour
nébuliseur**



Mesurez le temps nécessaire pour procéder à la nébulisation de 2,5 ml de solution sérum physiologique (NaCl 0,9 %).

- ➔ 1. Si la nébulisation dure entre 4 et 5 minutes, le tamis pour nébuliseur doit être **nettoyé** à l'aide de l'outil easycare. **4 minutes**
- ➔ 2. Si la nébulisation dure plus de 5 minutes après le nettoyage à l'aide d'easycare, le tamis pour nébuliseur doit être **remplacé**. **5 minutes**

Composants



* La chambre du nébuliseur et le réservoir à médicaments sont pré-montés et ne peuvent pas être dissociés.