


### CONTENU DU KIT

- 20 cassettes test
- 2 flacons de tampon
- 20 écouvillons nasopharyngés stériles
- 20 tubes d'extraction et 20 embouts avec filtre
- 1 porte tubes
- 1 notice d'utilisation

Lire attentivement  
la notice d'utilisation



### 1 PRÉPARATION DU TAMPON D'EXTRACTION

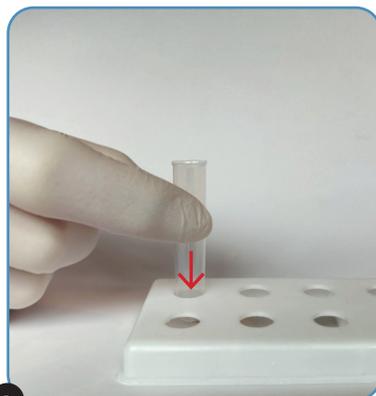


a Insérer le tube d'extraction  
au fond du support




b Ajouter 10 gouttes  
de tampon d'extraction

### 2 PRÉLÈVEMENT NASOPHARYNGÉ

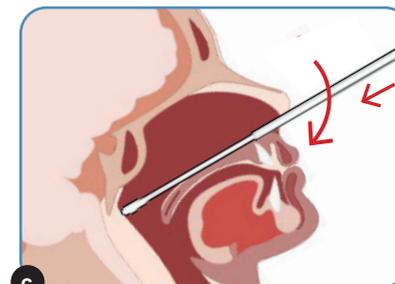


c Introduire l'écouvillon à l'**horizontal**  
par rapport au visage et enfoncer  
jusqu'à sentir une butée  
Tourner plusieurs fois l'écouvillon  
pendant **5 secondes**


### 3 PRÉPARATION DE L'ÉCHANTILLON

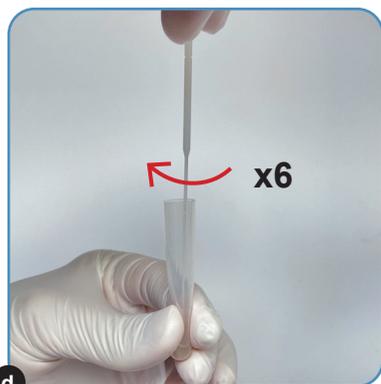

d Plonger l'écouvillon dans le tube  
d'extraction et le tourner au moins  
6 fois tout en pressant sa tête  
contre le fond et les côtés  
du tube d'extraction

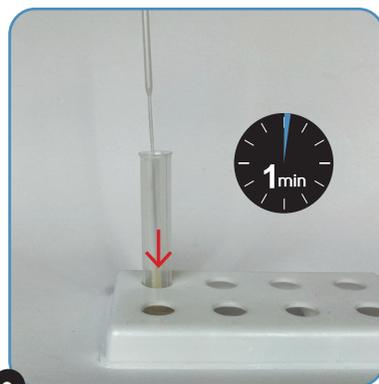

e Laisser reposer l'écouvillon  
1 minute dans le tube d'extraction

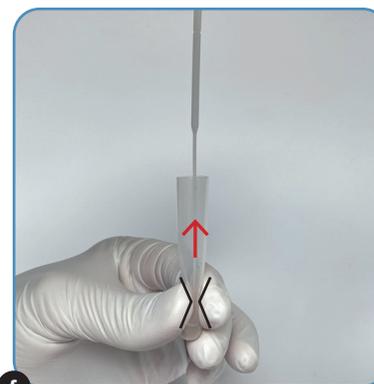

f Retirer l'écouvillon en le pressant contre  
les parois du tube d'extraction et le jeter



**L'EMBOUT DOIT ÊTRE COMPLÈTEMENT  
INSÉRÉ DANS LE TUBE**

SUITE AU DOS

### 4 PROCÉDURE

### 5 LECTURE



**ATTENDRE 15 MINUTES  
AVANT DE LIRE LE TEST**

Lire le test à la lumière naturelle ou avec un éclairage suffisant afin de distinguer les bandes de très faible intensité.



**h** Retirer la cassette du sachet et la poser sur une surface plane



**i** Déposer 4 gouttes d'échantillon dans le **puits échantillon (S)** de la cassette.

**LE FLACON DOIT ÊTRE MAINTENU À LA VERTICALE**



**NÉGATIF**



**POSITIFS**



L'intensité des bandes rouges peut varier.

AAZ.CV.17-A

### CONTACT

+33 (0) 1 46 00 40 40  
[contact@aazlab.fr](mailto:contact@aazlab.fr)



43, rue de Bellevue | 92100 Boulogne-Billancourt

VIDÉO DE DÉMONSTRATION  
 DISPONIBLE SUR :  
[www.covid19aaz.com](http://www.covid19aaz.com)