

# FarmaPet



Tests Rapides



pour Maladies Infectieuses

Felines et Canines

Procédez au dépistage  
de votre animal  
vous même.

Tests recommandés par :

Facilité d'utilisation



facile

Sensibilité élevée

jusqu'à  
98%

Spécificité

jusqu'à  
98,5%

Résultats rapides

en 5 à  
10 minutes

Dr. NICOLAS

DESWARTE

" Protéger votre animal  
n'a jamais été aussi facile. "

# FarmaPet

## Chats

Symptômes  
Respiratoires

### Maladies testées :

- FCV : Syndrome Coryza
- FHV : Herpes Virose Feline



Symptômes  
Digestifs

### Maladies testées :

- FPV : Typhus du Chat
- FCOV : Coronavirus Félin
- FIPV : Péritonite Infectieuse Feline




## Chiens

Symptômes  
Respiratoires

### Maladies testées :

- CDV : Maladie de Carré
- CPIV : Toux du Chénil
- CAV 2 : Adenovirus Canin Type 2

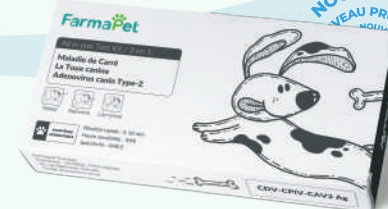

Symptômes  
Digestifs

### Maladies testées :

- CPV : Gastroenterite Virale Hemorragique
- CCV : Coronavirus Canin



## Mode d'emploi



PRELEVEZ UN ECHANTILLON DE SALIVE, OU DE SELLES EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS.



TOURNEZ L'ECOUVILLON DANS LE TUBE A ECHANTILLON.



AJOUTEZ 4 GOUTTES DE SOLUTION DANS LA PLAQUE DE TEST.


1) Négatif :



2) Positif :



3) Non valide :

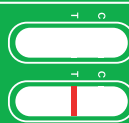

OBTENEZ LE RÉSULTAT EN 5 A 10 MINUTES :

- NÉGATIF
- POSITIF
- NON VALIDE



# Tableau des maladies testées

		SYMPTOMES <sup>(1)</sup>		MODE DE TRANSMISSION							
		RESPIRATOIRES	DIGESTIFS	Contact avec congénère	Surface contaminée	Aérien	RISQUE CONTAGIEUX	MORTALITE <sup>(2)</sup>	VACCIN EXISTANT	ISOLEMENT RECOMMANDE	RESURGENCE DE LA MALADIE
MALADIES INFECTIEUSES DU CHIEN	MALADIE DE CARRE	x		x		x	+++	+++	x	x	x
	TOUX DU CHENIL	x		x		x	+++	++	x	x	
	ADENOVIRUS CANIN TYPE 2	x		x	x		+++	++	x	x	
	GASTROENTERITE VIRALE HEMORRAGIQUE		x	x	x		+++	+++	x	x	
	CORONAVIRUS CANIN		x	x	x		++	++	x	x	
MALADIES INFECTIEUSES DU CHAT	CALICIVIROSE ( Syndrome Coryza)	x		x	x		+++	++	x	x	
	HERPES VIROSE FELINE ( Infection oculaire et respiratoire)	x		x	x		+++	+	x	x	
	TYPHUS DU CHAT		x	x	x		+++	+++	x	x	
	CORONAVIRUS FELIN		x	x			+++	+		x	
	PERITONITE INFECTIEUSE FELINE		x	x			+++	+++		x	

## (1) - SYMPTOMES :

### SYMPTOMES DIGESTIFS

Echantillon testé: Selles

### SYMPTOMES RESPIRATOIRES

Echantillon testé: salive, écoulement nasal ou lacrymal

## (2) - Les niveaux de risque :

+: Risque faible

++ : Risque élevé

+++ : Risque extrême

## Contactez-nous:

TÉL: +33 668 33 41 85

MAIL: s.kazitani@globalprovision.com

FARMAPET EUROPE. MARQUE DE GLOBAL PROVISION  
18, RUE BALTHAZAR DIEUDÉ 13006 - MARSEILLE, FRANCE.

[www.farmapet-europe.com](http://www.farmapet-europe.com)

